


ワンタッチベリオビュー® 簡単使い方ガイド

測定の注意


- 糖尿病治療や血糖測定は必ず医師の指導・管理のもとで行い、測定結果により自己判断で糖尿病治療を中断・変更しないでください。
- 血糖値指標により自己判断で糖尿病治療などを中断・変更しないでください。[血糖値指標の表示は、測定結果が医師の設定した血糖値目標範囲の範囲内、または範囲外であるかを示すものであり、使用者の自己判断や診断を行うものではありません]

血糖値の測定に必要なもの

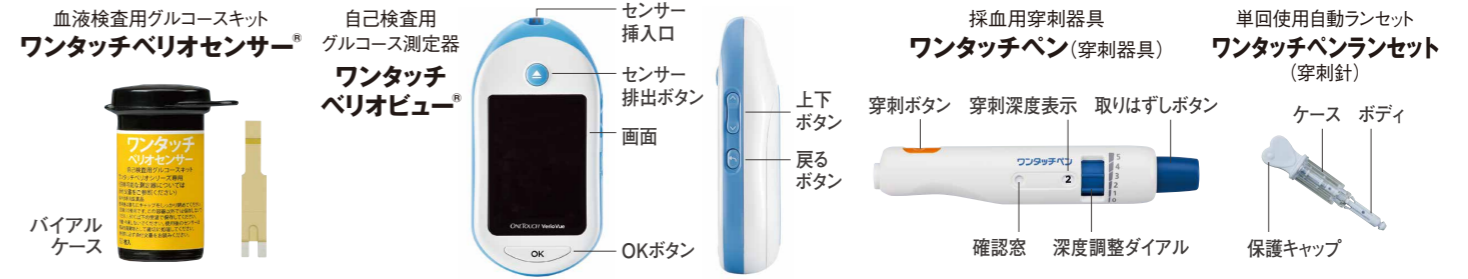

器具の準備、穿刺、測定は清潔な状態で実施しましょう

穿刺部位

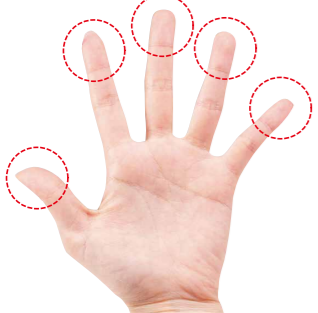

穿刺器具の準備

1 深度調整ダイヤルを回して、穿刺深度を調整します。

深度 0, 1	より浅い穿刺
深度 2, 3	標準的な穿刺
深度 4, 5	より深い穿刺



2 保護キャップを持って穿刺針を穿刺器具にカチッと音がするまでしっかり押し込んでください。



3 確認窓がオレンジ色になったことを確認します。



4 保護キャップをねじって取りはずしてください。(穿刺針が正しく装着されていないと保護キャップがねじれません)



測定器の準備

5 バイアルケースに指を入れてセンサーを取り出します。




6 センサーの向きに注意し、二本足側から挿入して、測定器の電源を入れます。



穿刺

7 穿刺針ケースの先端を穿刺部位にしっかり押し当てたまま、穿刺ボタンを押してください。(一度穿刺ボタンを押すと、再穿刺できません)

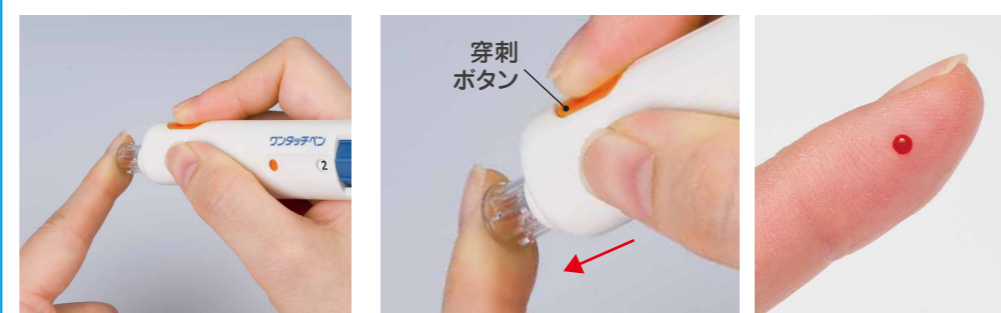


測定

8 センサーの血液吸引部分に血液を吸引してください。(測定器の自動節電モードで画面が暗くなっている場合がありますが、そのまま血液吸引が可能です。もしくは、OK ボタンを押して明るくしてください)



9 カウントダウンが始まり、約5秒後に測定結果が表示されます。

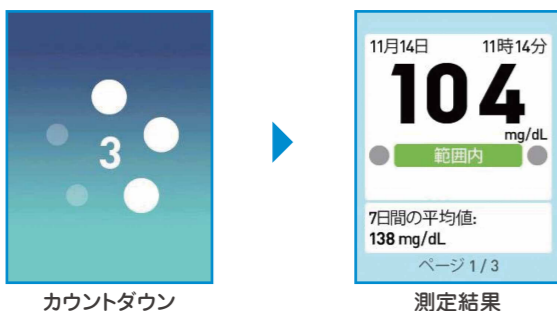

後片付け

10 センサー排出ボタンを押すと、センサーが排出されます。(穿刺針を手で引き抜くと故障の原因になります)



ふりかえり

11 OK ボタンを押すことで「ふりかえり画面」が表示されます。(測定器の自動節電モードで画面が暗くなっていたら OK ボタンを押してください)



電源オフ

12 OK ボタンを長押しし、電源をオフにします。



ワンタッチベリオビュー®
エラー/注意画面の対処方法

エラー1

測定器に問題があります。

コーンセンターにご連絡ください。

【意味】
測定器に問題がある可能性があります。

【対処法】
この測定器は使用せず、ワンタッチコールセンター0120-113-903(24時間365日受付)にお問い合わせください。

エラー2

使用済みのセンサーを測定器に挿入したか、測定器がセンサーに問題があります。新しいセンサーで再測定してください。

【意味】
使用済みのセンサーを挿入した、または測定器がセンサーに何か問題があると考えられます。

【対処法】
新しいセンサーを使って再測定してください。

エラー3

測定準備完了前にセンサーに血液等をつけた可能性があります。新しいセンサーで再測定してください。

【意味】
測定準備が完了する前に、血液またはコントロール溶液をセンサーに点着した可能性があります。

【対処法】
新しいセンサーを使って再測定してください。画面に「血液をつけてください」と表示された後は血液を、また「コントロール溶液をつけてください」と表示された後はコントロール溶液を点着してください。

エラー4

血液不足または点着方法に問題がある可能性があります。新しいセンサーで再測定してください。

【意味】
次のいずれかの問題が生じた可能性があります。
◎血液またはコントロール溶液が不十分か、測定器のカウントダウンが始まってからさらに追加した可能性があります。
◎センサーに問題がある、または測定中にセンサーを動かした可能性があります。
◎血液またはコントロール溶液のつけ方(点着方法)が正しくなかった可能性があります。
◎測定器に問題がある可能性があります。

【対処法】
新しいセンサーを使って再測定してください。

エラー5

センサーに問題が発生しました。新しいセンサーで再測定してください。

【意味】
測定器がセンサーに問題があることを検出しました。センサーが損傷していることが考えられます。

【対処法】
新しいセンサーを使って再測定してください。

注意

血糖値が20mg/dL未満です。直ちに医師の指示に従ってください。

【意味】
血糖値が20mg/dL未満になっているおそれがあります。

【対処法】
ただちに医師の指示にしたがってください。

注意

血糖値が600mg/dLを超えています。直ちに医師の指示に従ってください。

【意味】
血糖値が600mg/dLより高くなっているおそれがあります。

【対処法】
ただちに医師の指示にしたがってください。

注意

測定器の温度が44℃より高くなっています。動作範囲内の環境(16℃~44℃)でご使用ください。

【意味】
測定器の温度が動作温度範囲外(44℃を超える)にあるので、正常に動作しません。

【対処法】
動作温度範囲内(6~44℃)の場所に測定器とセンサーを置いて、数分間待ってから、新しいセンサーを挿入してください。このメッセージが再び表示されなければ、測定できます。

注意

測定器の温度が6℃より低くなっています。動作範囲内の環境(16℃~44℃)でご使用ください。

【意味】
測定器の温度が動作温度範囲外(6℃未満)にあるので、正常に動作しません。

【対処法】
動作温度範囲内(6~44℃)の場所に測定器とセンサーを置いて、数分間待ってから、新しいセンサーを挿入してください。このメッセージが再び表示されなければ、測定できます。

4月30日 09時45分

104 mg/dL

範囲内

【意味】
測定はできますが、電池残量が少なくなっています。

【対処法】
いったん電池残量低下マークが表示されると、電池を交換するまでこのマークを点滅表示し続けます。正確な測定結果を得ることができますが、できるだけ早く電池を交換してください。

電池残量が少なくなりました。早めに単4電池2本を交換してください。

OK

【意味】
測定はできますが、電池残量が少なくなっています。

【対処法】
測定を続けるには「OK」ボタンを押します。その場合も、できるだけ早く新しい電池に交換してください。

電池残量がなくなりました。直ちに単4電池2本を交換してください。

【意味】
測定を行うための電池が残っていません。

【対処法】
すぐに新しい電池に交換してください。

【意味】
測定器の温度が動作温度範囲外(6℃未満)にあるので、正常に動作しません。

【対処法】
動作温度範囲内(6~44℃)の場所に測定器とセンサーを置いて、数分間待ってから、新しいセンサーを挿入してください。このメッセージが再び表示されなければ、測定できます。

詳細については「添付文書」および「取扱説明書」を参照してください。

●ワンタッチベリオビュー 承認番号: 22600BZX00312000 製造販売元: ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
●ワンタッチベリオビューセンサー 承認番号: 22400AMX01423000 製造販売元: メディカル カンパニー ライフサイエンス事業部
●ワンタッチペン 承認番号: 33B2X00002000003 製造販売元: ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
●ワンタッチペンラセット 承認番号: 221AFBZX00044000 製造販売元: メディカル カンパニー ライフサイエンス事業部

製品に関して
困ったことがありましたら
24時間・365日、
いつでも対応いたします。

こんなときにお気軽にお電話ください。

- ◎測定器の調子が悪い
- ◎メモリーの見方が分からない
- ◎測定器の使い方を忘れてしまった
- ◎電池の替え方が分からない
- ◎針が出ない
- ◎その他、血糖自己測定に関するお困りごと

つねにスタッフが対応いたします。

自動音声ではなく、つねにスタッフが電話口で対応しますので、ご高齢の患者さまでも安心です。むずかしいプッシュボタン操作も必要ありません。

困ったなあ
コールセンターに電話してみよう

はい、こちらワンタッチ
コールセンターです

もしもし
〇〇病院に通院中の
△△ですが...

製品についてのお問い合わせは
「ワンタッチコールセンター」まで。

ワンタッチ コールセンター
0120-113-903
24時間365日
携帯電話・PHSからでもかけられます。