

ファインビジョン *Influenza*

Fine-Vision Influenza

操作方法


1. キャップを開ける

検体抽出容器を垂直に持ち、キャップを外します。




2. 綿棒を入れ回転させる

内容液に検体採取後の綿球部分を浸し、検体抽出容器の外側から綿棒を指で押さえながら、**5回以上**回転させます。検体抽出容器の外側から綿棒を指で押さえながら引き上げ、検体を絞り出します。

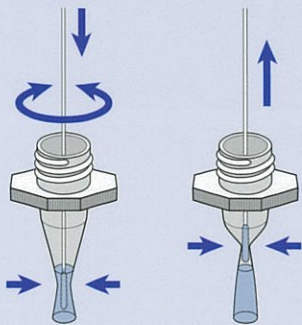

3. フィルター付ノズルを付け、3滴滴下する

検体抽出容器にフィルター付ノズルを取り付けます。試料液 **3滴** をテストデバイスの検体添加部に滴下します。**5分後**に判定領域を観察し、各ラインの有無により判定します。

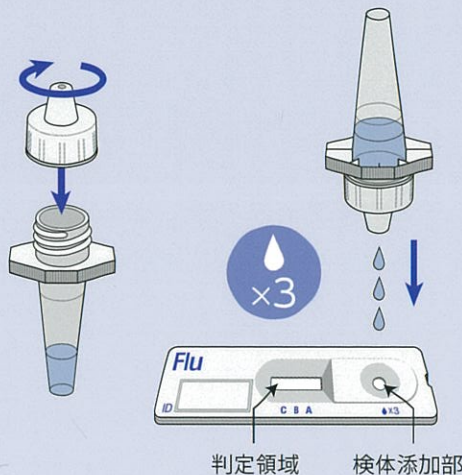

判定法

5分後に判定領域を観察し、ラインの有無によって判定してください。



A型インフルエンザライン (A) に赤色、コントロールライン (C) に緑色のラインを認めた場合。

B型インフルエンザライン (B) に青色、コントロールライン (C) に緑色のラインを認めた場合。

コントロールライン (C) のみ緑色のラインを認めた場合。



コントロールライン (C) に緑色のラインが認められなかった場合は、たとえA型インフルエンザライン (A) に赤色、またはB型インフルエンザライン (B) に青色のラインが認められたとしても検査は無効です。別のテストデバイスを用いて再検査をしてください。

使用上の注意

1. 本キットは、インフルエンザウイルス抗原の検出試薬であり、定量目的には使用しないでください。
2. 本キットを分解して使用しないでください。
3. 異なる製造番号のキット中の試薬は組み合わせて、検体抽出液は混ぜて使用しないでください。
4. テストデバイスを再使用しないでください。
5. 滅菌綿棒に折損、曲がり、汚れがあった場合は使用しないでください。
6. その他の注意事項は添付文書を参照してください。